

Polysorb™ Плетеный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал, LACTOMER™ 9-1

Описание материала:	Покрытый, плетеный синтетический рассасывающийся шовный материал Polysorb™ состоит из LACTOMER™ 9-1 кополимера гликолид/лактида, который представляет собой синтетический полиэфир, состоящий из гликолида и лактида, полученных из гликолиевой и молочной кислоты. Шовный материал Polysorb™ при изготовлении покрывается составом из кополимера капролактона/гликолида и стеаройл лактилата кальция.
Характеристика материала:	Усовершенствованный процесс экструзии молекул LACTOMER™ 9-1, эксклюзивный метод плетения и система покрытия обеспечивают шовный материал следующими уникальными свойствами: - превосходная прочность в период критического поддержания раны - превосходная прочность узла - прекрасные манипуляционные свойства - предсказуемые сроки рассасывания.
Показания:	Шовный материал Polysorb™ предназначен для сшивания или для лигирования тканей в общей, торакальной хирургии, урологии и гинекологии, офтальмохирургии. Однако применение в сердечно-сосудистой хирургии и на нервных тканях ограничено.
Действие:	Синтетический рассасывающийся шовный материал Polysorb™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Polysorb™ происходит путем гидролиза, когда Lactomer™ 9-1 распадается на гликолиевую и молочную кислоты, которые впоследствии рассасываются и метаболизируются в организме.
Прочность:	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Polysorb™ определили, что его первоначальная прочность в узле оценивается как 140% стандарта USP и EP. 80% прочности сохраняется в первые 2 недели и 30% сохраняется по истечению 3 недель после имплантации шовного материала.
Рассасывание:	Процесс рассасывания начинается как потеря прочности без потери массы и заканчивается между 56 и 70 днями.
Стерилизация:	Этилен оксид.
Упаковка:	Шовный материал Polysorb™ производится в бесцветном варианте или окрашенном в фиолетовый цвет. Возможные варианты размеров от 2 (метрический размер 5) до 8-0 (метрический размер 0.4). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, как перманентно зафиксированных, так и отсоединяемых. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.

Polysorb™ Плетеный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал, LACTOMER™ 9-1

Без игл / Non Needed						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
Лигатуры	4-0	1.5	12x45	Неокрашенный	24	L-1
	4-0	1.5	12x45	Фиолетовый	24	L-11
	4-0	1.5	3x45	Фиолетовый	36	L-71
	4-0	1.5	6x45	Фиолетовый	24	L-20
	3-0	2	12x45	Неокрашенный	24	L-2
	3-0	2	12x45	Фиолетовый	24	L-12
	3-0	2	3x45	Фиолетовый	36	L-72
	3-0	2	6x45	Фиолетовый	24	L-22
	3-0	2	12x60	Фиолетовый	24	L-32
	3-0	2	3x75	Фиолетовый	24	L-402
	3-0	2	6x75	Фиолетовый	24	L-38
	2-0	3	12x45	Неокрашенный	24	L-3
	2-0	3	12x45	Фиолетовый	24	L-13
	2-0	3	3x45	Фиолетовый	36	L-73
	2-0	3	6x45	Фиолетовый	24	L-23
	2-0	3	12x60	Фиолетовый	24	L-33
	2-0	3	3x75	Фиолетовый	24	L-403
	2-0	3	6x75	Фиолетовый	24	L-39
	0	3.5	12x45	Неокрашенный	24	L-24
	0	3.5	12x45	Фиолетовый	24	L-27
	0	3.5	3x45	Фиолетовый	36	L-74
	0	3.5	6x45	Неокрашенный	24	L-4
	0	3.5	6x45	Фиолетовый	24	L-14
	0	3.5	12x60	Фиолетовый	24	L-34
	0	3.5	3x75	Фиолетовый	24	L-404
	0	3.5	6x75	Фиолетовый	24	L-40
	1	4	12x45	Неокрашенный	24	L-25
	1	4	12x45	Фиолетовый	24	L-35
	1	4	3x45	Фиолетовый	36	L-75
	1	4	6x45	Неокрашенный	24	L-5
	1	4	6x45	Фиолетовый	24	L-15
	1	4	12x60	Фиолетовый	24	L-36
	1	4	3x75	Фиолетовый	24	L-405
	1	4	6x75	Фиолетовый	24	L-41

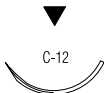
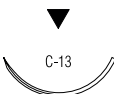
Polysorb™

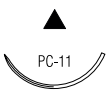
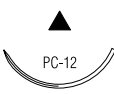
Плетеный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал, LACTOMER™ 9-1

Без игл / Non Needed							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
Лигатуры	2	5	12x45	Неокрашенный	24	L-26	
	2	5	12x45	Фиолетовый	24	L-28	
	2	5	3x45	Фиолетовый	36	L-76	
	2	5	3x75	Фиолетовый	24	L-406	
	2	5	6x75	Фиолетовый	24	L-42	

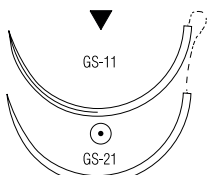
Без игл / Non Needed							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
Отрезки стандартной длины	4-0	1.5	150	Фиолетовый	36	L-111	
	3-0	2	150	Фиолетовый	36	L-112	
	2-0	3	150	Фиолетовый	36	L-113	
	0	3.5	150	Фиолетовый	36	L-114	
	1	4	150	Фиолетовый	36	L-115	
	2	5	150	Фиолетовый	36	L-116	
Катушки	4-0	1.5	150	Неокрашенный	24	LL-101	
	4-0	1.5	150	Фиолетовый	24	LL-111	
	4-0	1.5	250	Фиолетовый	24	LL-221	
	3-0	2	150	Фиолетовый	24	LL-112	
	3-0	2	250	Неокрашенный	24	LL-322	
	3-0	2	250	Фиолетовый	24	LL-222	
	2-0	3	150	Фиолетовый	24	LL-113	
	2-0	3	250	Неокрашенный	24	LL-323	
	2-0	3	250	Фиолетовый	24	LL-223	
	2-0	3	360	Фиолетовый	24	LL-233	
	0	3.5	150	Фиолетовый	24	LL-114	
	0	3.5	250	Фиолетовый	24	LL-224	
	1	4	150	Фиолетовый	24	LL-115	
	1	4	250	Фиолетовый	24	LL-225	
	2	5	150	Фиолетовый	24	LL-116	
	2	5	250	Фиолетовый	24	LL-226	

Polysorb™ Плетеный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал, LACTOMER™ 9-1

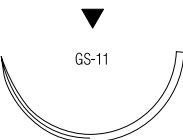
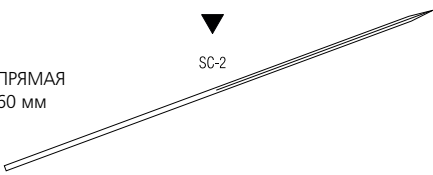
Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 КРУГА 16 мм		5-0	1	75	Фиолетовый	36	SL-630
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SL-605
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SL-607
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	SL-604
		3-0	2	75	Фиолетовый	36	SL-608
3/8 КРУГА 19 мм		5-0	1	75	Неокрашенный	36	SL-690
		5-0	1	75	Фиолетовый	36	SL-634
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SL-691
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	12	SL-691-G
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SL-635
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	12	SL-635-G
		3-0	2	45	Неокрашенный	36	SL-637
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	SL-822
		3-0	2	75	Неокрашенный	12	SL-822-G
		3-0	2	75	Фиолетовый	36	SL-636
3/8 КРУГА 24 мм		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SL-692
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	SL-693
		3-0	2	75	Фиолетовый	36	SL-694
		2-0	3	75	Неокрашенный	36	SL-823
		2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-823

Косметическая режущая / Cosmetic Conventional Cutting							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 КРУГА 11 мм		5-0	1	45	Неокрашенный	36	SL-1659
3/8 КРУГА 16 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SL-1657
3/8 КРУГА 19 мм		5-0	1	45	Неокрашенный	36	SL-1651
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SL-1653
		3-0	2	45	Неокрашенный	36	SL-1654

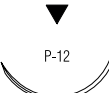
Polysorb™ Плетеный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал, LACTOMER™ 9-1

Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
3/8 КРУГА 26 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SL-586	
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	SL-587	
3/8 КРУГА 30 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SL-696	
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SL-611	
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	SL-712	
	1	4	75	Неокрашенный	36	SL-609	
1/2 КРУГА 20 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SL-629	
1/2 КРУГА 24 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SL-613	
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SL-632	
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SL-612	
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	SL-631	
1/2 КРУГА 26 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	CL-868	
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	CL-869	
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-769	
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	CL-870	
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-770	
	1	4	75	Неокрашенный	36	CL-867	
1/2 КРУГА 26 мм Н 	1	4	75	Неокрашенный	36	CL-581	
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-547	
	2	5	75	Фиолетовый	36	CL-552	
1/2 КРУГА 30 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	SL-622	
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	SL-721	
	1	4	90	Фиолетовый	36	SL-722	
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	135	Фиолетовый	36	CL-992	
1/2 КРУГА 37 мм Н 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-526	
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-528	

Polysorb™ Плетеный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал, LACTOMER™ 9-1

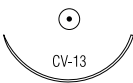
Обратно режущая / Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 КРУГА 37 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	CL-815
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	CL-543
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-816
	2-0	3	90	Фиолетовый	36	CL-916
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	CL-544
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-817
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CL-534
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-917
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-818
	1	4	90	Неокрашенный	36	CL-535
	1	4	90	Фиолетовый	36	CL-918
	2	5	90	Неокрашенный	36	CL-533
	2	5	90	Фиолетовый	36	CL-919
1/2 КРУГА 40 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-833
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	CL-596
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-804
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-933
	1	4	75	Неокрашенный	36	CL-597
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-805
	1	4	90	Фиолетовый	36	CL-936
	2	5	90	Фиолетовый	36	CL-937
1/2 КРУГА 48 мм 	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-568
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-927
	1	4	75	Неокрашенный	36	CL-555
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-569
	1	4	90	Фиолетовый	36	CL-928
	2	5	90	Неокрашенный	36	CL-939
	2	5	90	Фиолетовый	36	CL-929
ПРЯМАЯ 60 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SL-643
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SL-653
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SL-642

Polysorb™ Плетеный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал, LACTOMER™ 9-1

Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 КРУГА 13 мм		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SL-5688
		6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SL-5688-G
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SL-5687
		5-0	1	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SL-5687-G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SL-5690
3/8 КРУГА 16 мм		5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SL-5626
		5-0	1	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SL-5626-G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SL-5686
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SL-5686-G
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	SL-5621
3/8 КРУГА 19 мм		5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SL-5636
		5-0	1	75	Неокрашенный	36	SL-5639
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SL-5627
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SL-5637
		3-0	2	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SL-5628
		3-0	2	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SL-5628-G
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SL-5638
3/8 КРУГА 24 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SL-5641
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SL-5678
		3-0	2	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SL-5640
		3-0	2	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SL-5640-G
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SL-5679
		3-0	2	75	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SL-5679-G
		2-0	3	75	Неокрашенный	36	SL-5680
1/2 КРУГА 13 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SL-1615
1/2 КРУГА 16 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SL-5633
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SL-5633-G
3/8 КРУГА 11 мм		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SL-1625
		6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SL-1625-G
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SL-1689
		5-0	1	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SL-1689-G

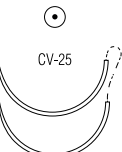
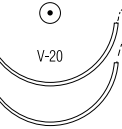
Polysorb™

Плетеный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал, LACTOMER™ 9-1

Колющая / Taper Point							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 КРУГА 13 мм		6-0	0.7	75	Фиолетовый	36	GL-889
		5-0	1	75	Фиолетовый	36	GL-890
3/8 КРУГА 17 мм		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	GL-881
3/8 КРУГА 22 мм		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	CL-304
		3-0	2	75	Фиолетовый	36	GL-303
		2-0	3	75	Фиолетовый	36	GL-302
3/8 КРУГА 26 мм		2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-457
3/8 КРУГА 32 мм		3-0	2	75	Фиолетовый	36	GL-522
		2-0	3	75	Фиолетовый	36	GL-523
		0	3.5	75	Фиолетовый	36	GL-524
1/2 КРУГА 12 мм		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™
		6-0	0.7	45	Фиолетовый	36	SURGALLOY™
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™
1/2 КРУГА 13 мм		5-0	1	75	Неокрашенный	36	GL-885
		4-0	1.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	GL-884
1/2 КРУГА 17 мм		6-0	0.7	75	Фиолетовый	36	UL-201
		5-0	1	75	Неокрашенный	36	UL-213
		5-0	1	75	Фиолетовый	36	UL-202
		4-0	1.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	UL-303
		3-0	2	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	UL-215
		3-0	2	75	Фиолетовый	36	UL-204
		2-0	3	75	Фиолетовый	36	UL-205
1/2 КРУГА 17 мм		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™

Polysorb™

Плетеный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал, LACTOMER™ 9-1

Колющая / Taper Point							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 КРУГА 20 мм		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	CL-460
		3-0	2	75	Фиолетовый	36	CL-461
1/2 КРУГА 22 мм		4-0	1.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™ GL-34-MG
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	GL-191
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	GL-181
		3-0	2	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™ GL-33-MG
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	GL-192
		3-0	2	75	Фиолетовый	36	GL-182
		3-0	2	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™ GL-182-M
		2-0	3	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™ GL-32-MG
		2-0	3	75	Фиолетовый	36	GL-183
1/2 КРУГА 22 мм		3-0	2	90	Фиолетовый	36	GL-282
1/2 КРУГА 22 мм		3-0	2	75	Фиолетовый	36	CL-892
		2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-893
		0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-894
1/2 КРУГА 26 мм		5-0	1	75	Фиолетовый	36	GL-120
		4-0	1.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™ GL-64-MG
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	GL-321
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™ GLS-121
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	GL-121
		3-0	2	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™ GL-63-MG
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	GL-322
		3-0	2	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™ GLS-122
		3-0	2	75	Фиолетовый	36	GL-122
		3-0	2	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™ GL-67-M
		3-0	2	90	Фиолетовый	36	GL-226
		2-0	3	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™ GL-62-MG
		2-0	3	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ GLS-323
1/2 КРУГА 26 мм		3-0	2	90	Фиолетовый	36	GL-332

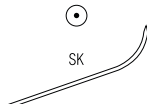
Polysorb™

Плетеный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал, LACTOMER™ 9-1

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 КРУГА 26 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36	GL-323	
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GLS-123
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	GL-123	
	2-0	3	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	GL-66-M
	2-0	3	90	Фиолетовый	36	GL-125	
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	GL-324	
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	GL-124	
1/2 КРУГА 27 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	CL-882	
	2-0	3	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-16-MG
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	CL-883
	0	3.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-17-MG
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	CLS-884
	0	3.5	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-886-M
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-330	
	1	4	75	Неокрашенный	36	CL-832	
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-885	
	1	4	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-885-M
	1	4	90	Фиолетовый	36	CL-331	
	2	5	75	Фиолетовый	36	CL-232	
1/2 КРУГА 27 мм Н 	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-871	
1/2 КРУГА 30 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	GL-222	
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	GL-228	
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	GL-223	
	2-0	3	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	GL-223-M
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	GL-224	
	1	4	75	Фиолетовый	36	GL-225	
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	GL-126	
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	GL-127	
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	GL-128	
	1	4	75	Фиолетовый	36	GL-129	
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	GL-126	

Polysorb™

Плетеный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал, LACTOMER™ 9-1

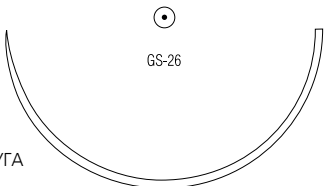
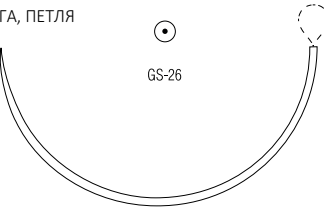
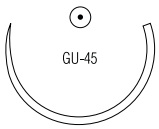
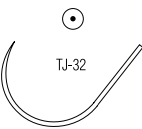
Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 КРУГА 37 мм 	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		CL-809
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		CL-842
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-810
	3-0	2	90	Неокрашенный	36		CL-952
	3-0	2	90	Фиолетовый	36		CL-922
	2-0	3	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-9-MG
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CL-843
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-811
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CL-953
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		CL-923
	0	3.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-10-MG
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CL-844
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	CLS-812
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-812
	0	3.5	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-5-M
1/2 КРУГА 37 мм 	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CL-954
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-924
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-11-MG
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-813
	1	4	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-6-M
	1	4	90	Неокрашенный	36		CL-955
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-925
	2	5	75	Фиолетовый	36		CL-814
1/2 КРУГА 37 мм Н 	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-926
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-930
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		CL-970
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-931
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-971
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-201-M
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-932
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-239
ЛЫЖА 23 мм 	3-0	2	18	Фиолетовый	36	ЭНДОСКОПИЯ	EL-415
	3-0	2	120	Фиолетовый	24	ЭНДОСКОПИЯ	EL-450

Polysorb™

Плетеный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал, LACTOMER™ 9-1

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 КРУГА 40 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	CL-800	
	3-0	2	90	Фиолетовый	36	CL-912	
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-801	
	2-0	3	90	Фиолетовый	36	CL-913	
	0	3.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-20-MG
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	CL-854	
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-802	
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CL-964	
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-914	
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-21-MG
	1	4	75	Неокрашенный	36	CL-855	
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-803	
1/2 КРУГА 40 мм 	1	4	90	Фиолетовый	36	CL-915	
	2	5	5x45	Фиолетовый	6	D-TACH™	CL-623-M
	2	5	5x60	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-622-M
	2	5	75	Фиолетовый	36	CL-779	
	2	5	90	Фиолетовый	36	CL-911	
1/2 КРУГА 48 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	CL-862	
	2-0	3	5x45	Неокрашенный	12	D-TACH™	CL-36-MG
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-863	
	2-0	3	90	Фиолетовый	36	CL-903	
	0	3.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-30-MG
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-864	
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CL-974	
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-904	
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-31-MG
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-865	
	1	4	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-64-M
	1	4	90	Фиолетовый	36	CL-905	
	2	5	5x45	Фиолетовый	6	D-TACH™	CL-633-M
	2	5	5x60	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-644-M
	2	5	75	Фиолетовый	36	CL-866	
	2	5	5x75	Фиолетовый	6	D-TACH™	CL-665-M
	2	5	90	Фиолетовый	36	CL-906	

Polysorb™ Плетеный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал, LACTOMER™ 9-1

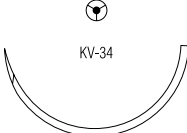
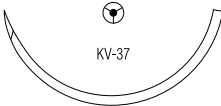
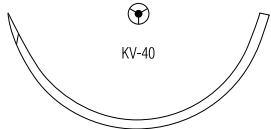
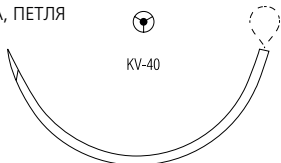
Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 КРУГА 65 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	24	CL-63	
	1	4	90	Фиолетовый	36	CL-968	
	1	4	150	Фиолетовый	24	CL-824	
	2	5	100	Неокрашенный	36	CL-969	
	2	5	150	Фиолетовый	24	CL-825	
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 65 мм 	1	4	120	Фиолетовый	24	Нить 120 см, петля 60 см CL-824-L	
	2	5	240	Фиолетовый	24	Нить 240 см, петля 120 см CL-835-L	
5/8 КРУГА 27 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	UL-879	
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	UL-878	
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	UL-877	
	1	4	75	Фиолетовый	36	UL-876	
5/8 КРУГА 27 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	UL-240	
5/8 КРУГА 27 мм Н 	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-677	
	1	4	75	Фиолетовый	36	UL-676	
5/8 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	UL-245	
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	UL-246	
5/8 КРУГА 40 мм 	0	3.5	75	Фиолетовый	36	UL-146	
J-ИГЛА 32 мм 	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-673	
	1	4	75	Фиолетовый	12	CL-673-G	

Polysorb™ Плетеный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал, LACTOMER™ 9-1

Микрохирургическая колющая / Microsurgery Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 КРУГА 6 мм Кривизна 140° Длина иглы 4.92 мм Радиус 2.62 мм 	8-0	0.4	13	Фиолетовый	12	SURGALLOY™	L-2800

Тупоконечная колющая / Blunt Taper							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 КРУГА 26 мм 	3-0	2	5x45	Неокрашенный	12	PROTECT-POINT™ D-TACH™	GLT-69-MG
1/2 КРУГА 37 мм 	3-0	2	90	Неокрашенный	36	PROTECT-POINT™	CLT-952
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	PROTECT-POINT™	CLT-259
	2-0	3	90	Неокрашенный	36	PROTECT-POINT™	CLT-953
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	PROTECT-POINT™	CLT-954
1/2 КРУГА 37 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	PROTECT-POINT™	CL-957
	1	4	90	Фиолетовый	36	PROTECT-POINT™	CL-958
1/2 КРУГА 40 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	PROTECT-POINT™	CL-950
	1	4	90	Фиолетовый	36	PROTECT-POINT™	CL-951
1/2 КРУГА 48 мм 	0	3.5	90	Неокрашенный	36	PROTECT-POINT™	CLT-854
1/2 КРУГА 48 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	PROTECT-POINT™	CL-948
	1	4	90	Фиолетовый	36	PROTECT-POINT™	CL-949
1/2 КРУГА 65 мм 	2	5	2x90	Фиолетовый	24	PROTECT-POINT™	2-CL-852

Polysorb™ Плетеный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал, LACTOMER™ 9-1

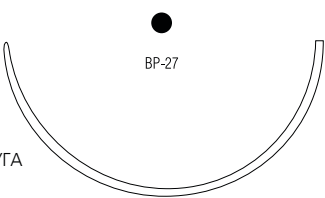
Колюще-режущая / Tapercutting							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 КРУГА 22 мм		1	4	75	Неокрашенный	36	CL-513
1/2 КРУГА 26 мм		3-0	2	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™ CL-510
		2-0	3	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™ CL-511
1/2 КРУГА 37 мм		3-0	2	90	Фиолетовый	36	CL-942
		2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-837
		2-0	3	90	Неокрашенный	36	CL-946
		2-0	3	90	Фиолетовый	36	CL-943
		0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-838
		0	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-944
		1	4	75	Фиолетовый	36	CL-839
		1	4	90	Неокрашенный	36	CL-516
		1	4	90	Фиолетовый	36	CL-945
		2	5	90	Фиолетовый	36	CL-517
1/2 КРУГА 40 мм		2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-603
		0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-602
1/2 КРУГА 48 мм		0	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-739
		1	4	75	Фиолетовый	36	CL-840
		1	4	90	Фиолетовый	36	CL-940
		2	5	75	Фиолетовый	36	CL-841
		2	5	90	Фиолетовый	36	CL-941
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 48 мм		1	4	150	Фиолетовый	24	Нить 150 см, петля 75 см CL-740-L
		2	5	150	Фиолетовый	24	Нить 150 см, петля 75 см CL-741-L

Шовные материалы Surgipro™ II и Surgipro™ 7-0, 8-0; Sofsilк™ 8-0; Polysorb™, Biosyn™, Monosoft™, Maxon™ отличаются от USP и EP только в диаметре. COVIDIEN и COVIDIEN с логотипом являются торговыми марками COVIDIEN AG. © 2012 Covidien AG или аффилированных структур.

Polysorb™ Плетеный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал, LACTOMER™ 9-1

Шпатель / Spatula							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/4 КРУГА 8 мм Кривизна 90° Длина иглы 7.18 мм Радиус 5.08 мм		6-0	0.7	30	Неокрашенный	12	L-1745-K
		6-0	0.7	30	Фиолетовый	12	SURGALLOY™ L-1742-K
		6-0	0.7	45	Неокрашенный	24	L-2752-K
		5-0	1	30	Фиолетовый	12	L-1785-K
1/4 КРУГА 7 мм Кривизна 90° Длина иглы 5.74 мм Радиус 4.06 мм		6-0	0.7	45	Фиолетовый	12	SURGALLOY™ L-1755-K
1/4 КРУГА 10 мм Кривизна 90° Длина иглы 8.44 мм Радиус 5.97 мм		6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	L-1670-K
		6-0	0.7	45	Фиолетовый	12	L-1791-K
		5-0	1	45	Неокрашенный	12	L-1669-K
		5-0	1	45	Фиолетовый	12	L-1792-K

Премиум шпатель / Premium Spatula							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 КРУГА 6 мм Кривизна 135° Длина иглы 4.80 мм Радиус 2.60 мм Микрон 200		8-0	0.4	30	Фиолетовый	12	SURGALLOY™ L-2748-K
		7-0	0.5	30	Фиолетовый	12	SURGALLOY™ L-1796-K
		7-0	0.5	45	Фиолетовый	12	SURGALLOY™ L-1897-K
1/2 КРУГА 6 мм Кривизна 160° Длина иглы 3.90 мм Радиус 1.98 мм Микрон 200		7-0	0.5	45	Фиолетовый	12	SURGALLOY™ L-1787-K

Тупоконечная / Blunt Point							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
 1/2 КРУГА 64 мм		1	4	90	Фиолетовый	36	CL-271
		2	5	90	Фиолетовый	36	CL-270

Polysorb™ Плетеный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал, LACTOMER™ 9-1

Многоцелевая / Multipurpose							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 КРУГА 30 мм		0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-030
		2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-045
		0	3.5	75	Фиолетовый	36	UL-046
1/2 КРУГА 40 мм		1	4	75	Фиолетовый	36	CL-047
		2	5	90	Фиолетовый	36	CL-055
1/2 КРУГА 50 мм	