



# Компрессионная терапия



## Чулки T.E.D.™

Анти-эмболические чулки T.E.D. - это профилактика риска развития тромбоза глубоких вен (ТГВ) и эмболии легочной артерии (ЭЛА). Клинически доказанный профиль компрессии, анатомическая форма, широкий модельный и размерный ряд обеспечивают комфорт для максимального большинства пациентов.

## Чулки до бедра

Объем бедер 1	Окружность голени в самой широкой части 2	Длина ноги от стопы до ягодицы 3	Код	Размер	Цветовой индикатор	
					На мыске	На верх. кромке
Менее 63,5 см	Менее 30,5 см (Small)	Менее 74 см (короткие)	3071LF	A	●	●
		74-84 см (средние)	3130LF	B	●	○
		Более 84 см (длинные)	3222LF	C	●	●
	30.5-38 см (Medium)	Менее 74 см (короткие)	3310LF	D	○	●
		74-84 см (средние)	3416LF	E	○	○
		Более 84 см (длинные)	3549LF	F	○	●
63.5-81.3 см	38-44.5 см (Large)	Менее 74 см (короткие)	3634LF	G	●	●
		74-84 см (средние)	3728LF	H	●	○
		Более 84 см (длинные)	3856LF	J	●	●
63.5-81.3 см	44.5-54.6 см (Extra Large Plus)	Менее 74 см (короткие)	3180LF	N	●	●
		74-84 см (средние)	3181LF	P	●	○
		Более 84 см (длинные)	3182LF	Q	●	●
81.3-91.4 см	54.6-66 см (Extra Extra Large)	Менее 74 см (короткие)	3183LF	R	●	●
		74-84 см (средние)	3184LF	S	●	○
		Более 84 см (длинные)	3185LF	T	●	●

## Чулки с поясом до бедра

Объем бедер 1	Окружность голени в самой широкой части 2	Длина ноги от стопы до ягодицы 3	Код	Размер	Цветовой индикатор	
					На мыске	На верх. кромке
Менее 63,5 см	Менее 25 см (Extra Small)	Менее 71 см (средние)	3306	-	●	○
		Более 71 см (длинные)	3320	-	●	●
	25-30.5 см (Small)	Менее 72 см (средние)	3039	A+	●	○
		Более 72 см (длинные)	3364	B+	●	●
	30.5-38 см (Medium)	Менее 72 см (средние)	3144	C+	○	○
		Более 72 см (длинные)	3449	D+	○	●
63.5-81 см	38-44.5 см (Large)	Менее 74 см (средние)	3221	E+	●	○
		Более 74 см (длинные)	3523	F+	●	●
63.5-81 см	38-44.5 см (Extra Large)	Менее 72 см (средние)	3922	G+	●	○
		Более 72 см (длинные)	3995	H+	●	●

## T.E.D.™ Антиэмболические чулки - руководство по подбору размера


## Чулки до колена

Окружность голени в самой широкой части <b>2</b>	Длина ноги от стопы до подколенной впадины <b>3</b>	Код	Размер	Цветовой индикатор	
				На мыске	На верх. кромке
Менее 30.5 см (Small)	Менее 41 см (средние) Более 41 см (очень длинные)	7071	A-	●	○
		7339	B-	●	●
30.5-38 см (Medium)	Менее 43 см (средние) Более 43 см (очень длинные)	7115	C-	○	○
		7480	D-	○	●
38-44.5 см (Large)	Менее 46 см (средние) Более 46 см (очень длинные)	7203	E-	●	○
		7594	F-	●	●
44.5-51 см (Extra Large)	Менее 46 см (средние) Более 46 см (очень длинные)	7604	G-	●	○
		7802	H-	●	●
51-58.4 см (Extra Extra Large)	Менее 46 см (средние) Более 46 см (очень длинные)	7470LF	J-	●	○
		7471LF	K-	●	●
58.4-66 см (Extra Extra Extra Large)	Менее 46 см (средние) Более 46 см (очень длинные)	7472LF	L-	○	○
		7473LF	M-	○	●

## Как снимать мерки

Рекомендация: при выборе модели по возможности отдавайте предпочтение чулкам до бедра. Используйте чулки до колена, только в случае, когда применение чулка до бедра не возможно по объективным причинам.

<b>1</b> Измерьте окружность бедра в самой широкой части. Если объем меньше 91,4 см., выберите модель "до бедра" или "до бедра с поясом"	Если объем бедра превышает 91,4 см., выберите модель "до колена"
<b>2</b> Измерьте окружность голени в самой широкой части.	<b>2</b> Измерьте окружность голени в самой широкой части.
<b>3</b> Измерьте расстояние от стопы до ягодичной складки	<b>3</b> Измерьте расстояние от стопы до подколенной впадины

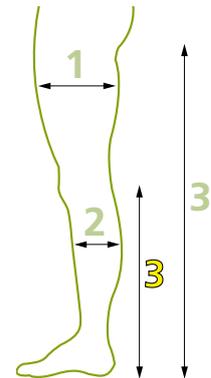


**ВАЖНО:** Аккуратно снимать все мерки, чтобы уровни компрессии правильно распределялись по ноге. Нужную модель и размер будет легко подобрать, если следовать данной инструкции. Чулки рекомендуются менять каждые 2-3 дня.

**ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:** Тяжелый отек ноги или отек легких, связанный с сердечной недостаточностью; тяжелая форма атеросклероза или другие ишемические заболевания сосудов; сильно выраженная деформация ног; локальные повреждения, такие как дерматит, гангрена, недавняя пересадка кожи.

## Как надевать изделие

1. Захватите изделие за пяточную часть с внешней стороны.
2. Выверните наизнанку.
3. Расположите изделие на стопе. Убедитесь, что пятка пациента находится точно в центре пяточного кармана.
4. Натяните чулок выше на щиколотку и икру, постепенно подтягивая до крайнего положения. Область сниженного давления должна располагаться на феморальной артерии. У чулок "до бедра" V-образная вставка должна располагаться на внутренней стороне бедра. У чулок "до колена" верхняя кромка должна располагаться на 3-5 см ниже подколенной впадины. Расправьте лишние складки по всей длине чулка и в области мыска.

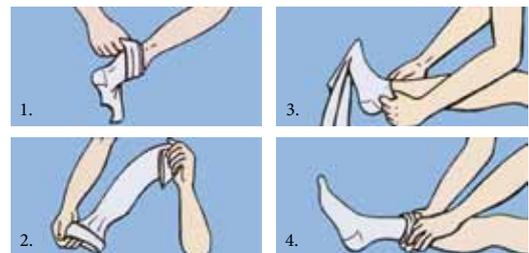

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не собирайте чулок "гармошкой", так как это усилит эластичное действие материала и затруднит надевание изделия.

## Длина до колена - Нестерильные - Используются у одного пациента

Код	Окруж. голени	Длина ноги	Кол-во шт. (мин.)
7071	< 31 см	<41 см	12 пар
7339	< 31 см	>41 см	12 пар
7115	31-38 см	<43 см	12 пар
7480	31-38 см	>43 см	12 пар
7203	38-45 см	<46 см	12 пар
7594	38-45 см	>46 см	12 пар
7604	45-51 см	<46 см	12 пар
7802	45-51 см	>46 см	12 пар
7470LF	51-58,5 см	<46 см	12 пар
7471LF	51-58,5 см	>46 см	12 пар
7472LF	58,5-66 см	<46 см	12 пар
7473LF	58,5-66 см	>46 см	12 пар



## Длина до бедра - Нестерильные - Используются у одного пациента

Код	Окруж. голени	Длина ноги	Окружность бедра	Кол-во шт. (мин.)
3071LF	< 31 см	< 74 см	< 63,5 см	6 пар
3130LF	< 31 см	74-84 см	< 63,5 см	6 пар
3222LF	< 31 см	> 84 см	< 63,5 см	6 пар
3310LF	30,5-38 см	< 74 см	< 63,5 см	6 пар
3416LF	30,5-38 см	74-84 см	< 63,5 см	6 пар
3549LF	30,5-38 см	> 84 см	< 63,5 см	6 пар
3634LF	38-44,5 см	< 74 см	< 63,5 см	6 пар
3728LF	38-44,5 см	74-84 см	< 63,5 см	6 пар
3856LF	38-44,5 см	> 84 см	< 63,5 см	6 пар
4010LF	38-44,5 см	< 74 см	63,5-81 см	6 пар
4114LF	38-44,5 см	74-84 см	63,5-81 см	6 пар
4216LF	38-44,5 см	> 84 см	63,5-81 см	6 пар
3180LF	44,5-54,6 см	< 74 см	63,5-81,3 см	6 пар
3181LF	44,5-54,6 см	74-84 см	63,5-81,3 см	6 пар
3182LF	44,5-54,6 см	> 84 см	63,5-81,3 см	6 пар
3183LF	54,6-66 см	< 74 см	81,3-91,4 см	6 пар
3184LF	54,6-66 см	74-84 см	81,3-91,4 см	6 пар
3185LF	54,6-66 см	> 84 см	81,3-91,4 см	6 пар



## Длина до бедра с поясом - Нестерильные - Используются у одного пациента

Код	Окруж. голени	Длина ноги	Окружность бедра	Кол-во шт. (мин.)
3306	< 25 см	< 71 см	< 63,5 см	6 пар
3320	< 25 см	> 71 см	< 63,5 см	6 пар
3039	25-30,5 см	< 72 см	< 63,5 см	6 пар
3364	25-30,5 см	> 72 см	< 63,5 см	6 пар
3144	30,5-38 см	< 72 см	< 63,5 см	6 пар
3449	30,5-38 см	> 72 см	< 63,5 см	6 пар
3221	38-44,55 см	< 74 см	< 63,5 см	6 пар
3523	38-44,55 см	> 74 см	< 63,5 см	6 пар
3922	38-44,55 см	< 72 см	63,5-81,3 см	6 пар
3995	38-44,55 см	> 72 см	63,5-81,3 см	6 пар



## Стойка в операционную для T.E.D. антиэмболических чулков длиной до бедра, нестерильные



Код	Описание	Кол-во шт. (мин.)
SP3500LF	Стойка в операционную	1 коробка

## ResT.E.D.™ Антиэмболические чулки - руководство по подбору размера

Res.T.E.D. Антиэмболические чулки предназначены для малоподвижных пациентов, находящихся на домашнем лечении. Res.T.E.D. сохраняют все особенности и преимущества чулок T.E.D. Модельный ряд дополнен изделиями других цветов.

### Модель "до бедра"

Объем бедер	Окружность голени в самой широкой части	Длина ноги от стопы до ягодицы	Код Белые	Код Бежевые	Код Черные	Кол-во шт. (мин.)
Менее 63.5 см	Менее 31 см (Small)	Менее 74 см (короткие)	WHI3071	BEI3071	BLK3071	1 пара
		74 см-84 см (средние)	WHI3130	BEI3130	BLK3130	1 пара
		Более 84 см (длинные)	WHI3222	BEI3222	BLK3222	1 пара
	31 см-38 см (Medium)	Менее 74 см (короткие)	WHI3310	BEI3310	BLK3310	1 пара
		74 см-84 см (средние)	WHI3416	BEI3416	BLK3416	1 пара
		Более 84 см (длинные)	WHI3549	BEI3549	BLK3549	1 пара
	38см-45 см (Large)	Менее 74 см (короткие)	WHI3634	BEI3634	BLK3634	1 пара
		74 см-84 см (средние)	WHI3728	BEI3728	BLK3728	1 пара
		Более 84 см (длинные)	WHI3856	BEI3856	BLK3856	1 пара

### Модель "до колена"

Окружность голени в самой широкой части	Длина ноги от стопы до подколенной впадины	Код Белые	Код Бежевые	Код Черные	Кол-во шт. (мин.)
Менее 31cm (Small)	Менее 41 см (средние)	WHI7071	BEI7071	BLK7071	1 пара
	Более 41 см (очень длинные)	-	BEI7339	BLK7339	1 пара
31-38 см (Medium)	Менее 43 см (средние)	WHI7115	BEI7115	BLK7115	1 пара
	Более 43 см (очень длинные)	WHI7480	BEI7480	BLK7480	1 пара
38-45 см (Large)	Менее 46 см (средние)	WHI7203	BEI7203	BLK7203	1 пара
	Более 46 см (очень длинные)	WHI7594	BEI7594	BLK7594	1 пара
45-51 см (Extra Large)	Менее 46 см (средние)	WHI7604	BEI7604	BLK7604	1 пара
	Более 46 см (очень длинные)	WHI7802	BEI7802	BLK7802	1 пара